

# VariLymph Pro

Pressothérapie professionnelle avec 12 chambres à air



**Wellell**

# VariLymph Pro



L'utilisation de la compression pneumatique intermittente (IPC en anglais) est une thérapie pour le traitement des maladies lymphatiques et circulatoires, confortable et sans effets secondaires. Il se compose d'un compresseur qui souffle de l'air dans les chambres recouvrant les membres. La pression et la durée de la thérapie peuvent être ajustées aux besoins et aux indications du patient.


Selon la Société Allemande de Phlébologie, les indications pour l'IPC sont les suivantes :

- Prophylaxie thromboembolique
- Ulcus cruris (ulcères)
- Œdème post-traumatique
- Œdème lipidique
- Œdème veineux
- Œdème lymphatique
- Œdèmes mixtes
- Occlusion artérielle périphérique
- Syndrome post-thrombotique
- Maladies sensorielles causées par l'hémiplégie, sous surveillance médicale stricte

# Fonctionnement

## 1. Ajustement optimal de la gaine avec extension

- Elle doit être adaptée à la circonférence de la jambe et du bras.
- Doit être suffisamment longue.
- Pour le traitement du lymphœdème et du lipœdème, le bassin doit être entièrement couvert.

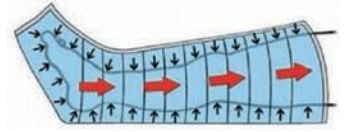

Jambière




Manchon



Pantalon

2. Les chambres vides sont remplies d'air par étapes successives.
3. La durée du remplissage dépend de l'anatomie du patient et du temps sélectionné. Ce processus permet d'évacuer le liquide des tissus afin de réduire l'œdème.
4. La pression, qui doit être réglée par un professionnel de santé, est adaptée précisément aux besoins du patient.
5. Lorsque toutes les chambres sont remplies, la gaine est gonflée pendant la durée du traitement définie. Après une courte pause, le cycle recommence. Pendant la pause thérapeutique, le sang oxygéné circule à nouveau dans les tissus.

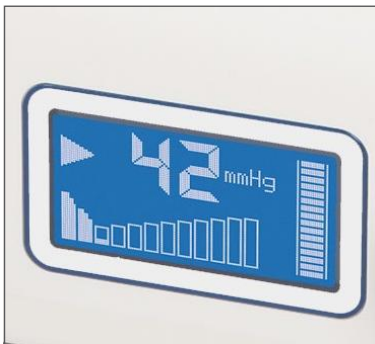

Compresseur avec affichage des informations et possibilité de raccorder jusqu'à 2 tuyaux



Gaine de qualité supérieure



Connecteur sécurisé et résistant à la torsion

Description du produit	Références
Kit Varilymph 12Pro (Varilymph 12Pro + Jambière standard + Manchon Bras/Epaule)	SLK12KIT
Compresseur	SLK4000
Manchon Bras/Epaule	SLK4043
Extension Manchon Bras/Epaule	SLK4101
Veste TU 2 Bras/Epaule	SLK3083
Pantalon standard 2 jambes	SLK4031
Pantalon fin 2 jambes	SLK4029
Extension pour Pantalon standard	SLK4034
Extension pour Pantalon fin	SLK4040
Jambière standard	SLK4030
Jambière fine	SLK4037
Jambière large	SLK4035
Extension pour Jambière standard	SLK4033
Extension pour Jambière fine	SLK4039

Spécifications du compresseur	
Dimensions et poids	17 x 20 x 20 cm (longueur x largeur x hauteur) 2 kg
Puissance	230 V, 50 Hz
Pression	15-80 mmHg
Sortie d'air	17 litres/min
Durée du cycle	10/60 min
Voies d'entrées/sorties	12
Matériel	ABS - Polylac® PA-765
Garantie	2 ans

Caractéristiques des manchons	Manchon Bras/Epaule long de 76 cm	Pantalon fin 2 jambes 106 cm	Pantalon standard 2 jambes 118 cm	Jambière Standard 81 cm	Jambière Fine 74 cm	Jambière Large 87 cm
Dimensions (en cm) et poids	85 X 58 x 53 x 50 (longueur x épaule x coude x main) 450 gr	106 x 72 x 68 x 60 (longueur x partie sup. x partie centrale x partie inf.) 530 gr	118 x 72 x 68 x 60 (longueur x partie sup. x partie centrale x partie inf.) 550 gr	81 x 75 x 60 x 45 (longueur x partie sup. x partie centrale x partie inf.) 450 gr	74 x 70 x 58 x 47 (longueur x partie sup. x partie centrale x partie inf.) 500 gr	87 x 89 x 81 x 72 (longueur x partie sup. x partie centrale x partie inf.)
Voies d'entrée et de sortie	12 x 2	12 x 2	12 x 2	12	12	12
Matériel	<b>Intérieur:</b> Nylon 210D laminé avec 0,15mm TPU <b>Extérieur:</b> Nylon 210D laminé avec 0,10mm TPU					
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Caractéristiques des extensions	Extension Bras/Epaule	Extension Pantalon fin	Extension Pantalon standard	Extension Jambière standard	Extension Jambière fine
Dimensions (en cm) et poids	7 x 7 (partie sup. x partie inf)	20 x 10 (partie sup. x partie inf) 300 gr	21 x 12 (partie sup. x partie inf) 300 gr	20 x 10 (partie sup. x partie inf) 300 gr	20 x 10 (partie sup. x partie inf) 300 gr
Voies d'entrée et de sortie	12	12 x 2	12 x 2	12	12
Matériel	<b>Intérieur:</b> Nylon 210D laminé avec 0,15mm TPU <b>Extérieur:</b> Nylon 210D laminé avec 0,10mm TPU				
Garantie	2 ans		2 ans	2 ans	2 ans

### Wellell France

4 Boulevard de la Chanterie  
49 124 Saint-Barthélemy-d'Anjou  
T +33 2 72 79 27 13  
[info.france@wellell.com](mailto:info.france@wellell.com)



# Wellell

