

Marc Kerharou : 06.17.01.07.55
Directeur Commercial
marc.kerharou@wellell.com

Maxime Manet : 06 38 23 93 55
Technico-commercial
maxime.manet@wellell.com

Aurélien Gleizes : 07 85 72 35 06
Technico-commercial
aurelien.gleizes@wellell.com

Amaury Peniguel : 06.71.24.55.06
Technico-commercial
amaury.peniguel@wellell.com

Julien Coutarel : 07.58.08.67.57
Technico-commercial
julien.coutarel@wellell.com

Julien D'agaro : 06.15.68.08.93
Technico-commercial
julien.dagaro@wellell.com

Distributed by

FRANCE
Wellell France SAS
4 Blvd. de La Chanterie,
49124 Saint Barthélemy d'Anjou,
Pays De La Loire, France
T +33 272 792 713 / F +33 285 730 767
adv.france@wellell.com

SIEGE SOCIAL - WELLELL Inc.
No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng, New Taipei City,
23679, Taiwan T +886 2 2268 3100
F +886 2 2268 6525

Print-2022
All rights reserved Specifications may change without notice.
www.wellell.com



Domus Auto

Matelas à Redistribution alternée des Pressions

- Convient aux patients présentant un risque moyen à élevé d'escarres.
- Ajustement automatique des pressions.
- CPR Rotative, pour un dégonflage rapide
- Décharge talonnière pour une protection optimale des talons

APEX
Wellell Group


Domus Auto

REF – 9C077A73

Variation des pressions durant l'alternance

Le Domus Auto est conçu pour :

- Maximiser la sécurité du patient,
- Offrir plusieurs modes thérapeutiques capables de répondre aux besoins cliniques du patient

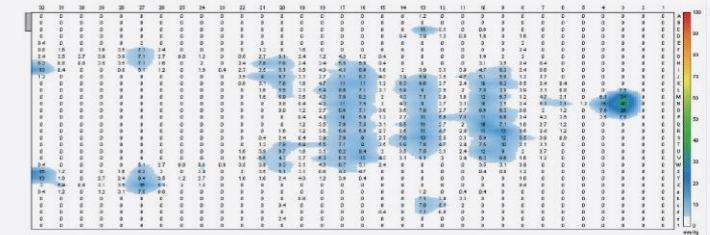

Réglage Automatique du poids jusqu'à 250 kg



Alarmes visuelle et sonore en cas :

- De basse pression,
- De problèmes liés à l'alimentation électrique,
- De dysfonctionnement du compresseur.

Verrouillage du panneau :

Le panneau se verrouille automatiquement au bout de 5 minutes. Appuyer pendant 3 secondes pour le déverrouiller.



Mode Dynamique : Alternance 1-sur-2, temps du cycle 10 min.



Mode Statique Basse Pression Continue : Réduit la pression avec 1/3 de moins que le niveau de pression en mode alterné



Fonction Assise : Dynamique et Statique : La pression est légèrement augmentée lors du relèvement à 30°




Fonction Surgonflage : Mode soin obligatoire pour le transfert du patient. (retour en mode dynamique après 20min.)



CPR Rotative
Pour un dégonflage rapide en cas d'urgence.

Cellules amovibles avec Technologie Cell-on-Cell
Pour éviter au patient de talonner en cas de rupture d'alimentation.

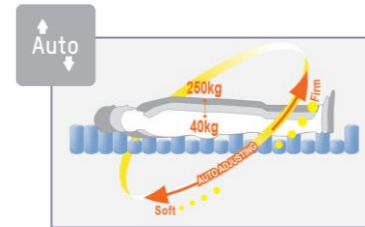


Ajustement automatique des pressions.



De 0 à 250 Kg


TUNING

Tuning
Permet au soignant d'affiner la notion de confort en fonction du ressenti patient.

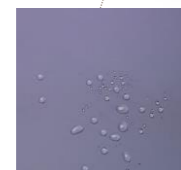

Housse soudée élastique dans les 4 sens

- Faible friction et cisaillement
- Imperméable aux liquides, perméable à la vapeur d'eau
- Ignifugée

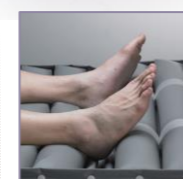

Décharge Talons
Cellules amovibles



Connecteur rapide
Connecteur rapide avec bouchon mode transport

Caractéristiques Techniques

Modèle		Domus Auto
Compresseur	Dimensions	29 x 18,5 x 12,6 cm
	Poids	2,2 kg
	Matériau boîtier	ABS Ignifugé
	Alimentation	220-240V / 50 Hz
Matelas	Temps de cycle	10 min.
	Dimensions	200 x 85 / 100 x 20,3 cm
	Hauteur cellule	20 Cellules de 20,3 cm Matelas 17 Cellules de 12,7 cm Surmatelas
	Poids	6,9 Kg Matelas
	Matériau Housse	Elastique stretch intégrale
	Matériau Cellule	TPU
	Poids maxi patient	250 kg Matelas
	Normes Feu	EN 597-1 & EN 597-2

