


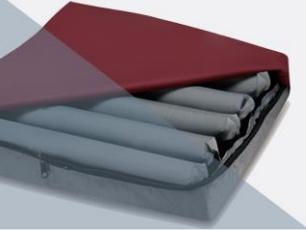

# Sedens 400

## Coussin à air non motorisé

- Le Sedens 400 est un coussin Hybride Air-Mousse à dépression composé de 6 Cellules combinées air-mousse : Réduction du talonnement, allègement des pressions, aide à la posture.
- Dispositif léger, compact et facile à transporter.



# Gamme Sedens

REF – 9M018011

Grâce à sa **valve brevetée** et exclusive, le coussin **Sedens 400** s'adapte à toutes les postures et garantit d'excellentes performances pour le confort et la prévention des escarres.



- Coussin **Hybride Air-Mousse à dépression**
- Dim. : 44 x 41 x 10 cm
- **6 Cellules combinées air-mousse :**  
Réduction du talonnement, allègement des pressions, aide à la posture.



Housse élastique dans les 4 sens

- Faible friction et cisaillement,
- Imperméable aux liquides, perméable à la vapeur d'eau,
- Ignifugée.





## Conseil d'utilisation Sedens 400 :

Le patient peut réaliser lui-même sa propre empreinte ainsi que son positionnement.

Installer le patient sur le coussin préalablement gonflé : ouvrir la valve, patienter 3 secondes.

Fermer la valve, le coussin conservera une empreinte personnalisée, tenant compte des différentes morphologies, il sera ainsi porté par les masses graisseuses allégeant les appuis au niveau des zones à risque.

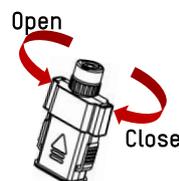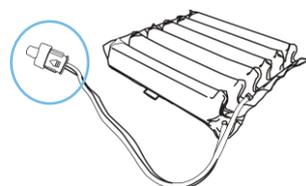

Cette opération peut être renouvelée à tout moment pour modifier le positionnement du patient.


## Caractéristiques Techniques

	Sedens 400
Dimension Coussin	44 x 41 x 10 cm
Poids Coussin	1.1 Kg
Partie sup. housse	Housse zippée Bi-élastique
Cellules	6 cellules
Partie inf. housse	Nylon/PU
Norme feu	120 kg
Norme feu	EN 597-1, EN 597-2

**Maxime Manet : 06 38 23 93 55**  
Technico-commercial  
maxime.manet@apexmedicalcorp.com

**Marc Kerharou : 06 17 01 07 55**  
Directeur des Ventes  
marc.kerharou@apexmedicalcorp.com

**Contacter Thierry DARRAS : 07 85 72 35 06**  
thierry.darras@apexmedicalcorp.com

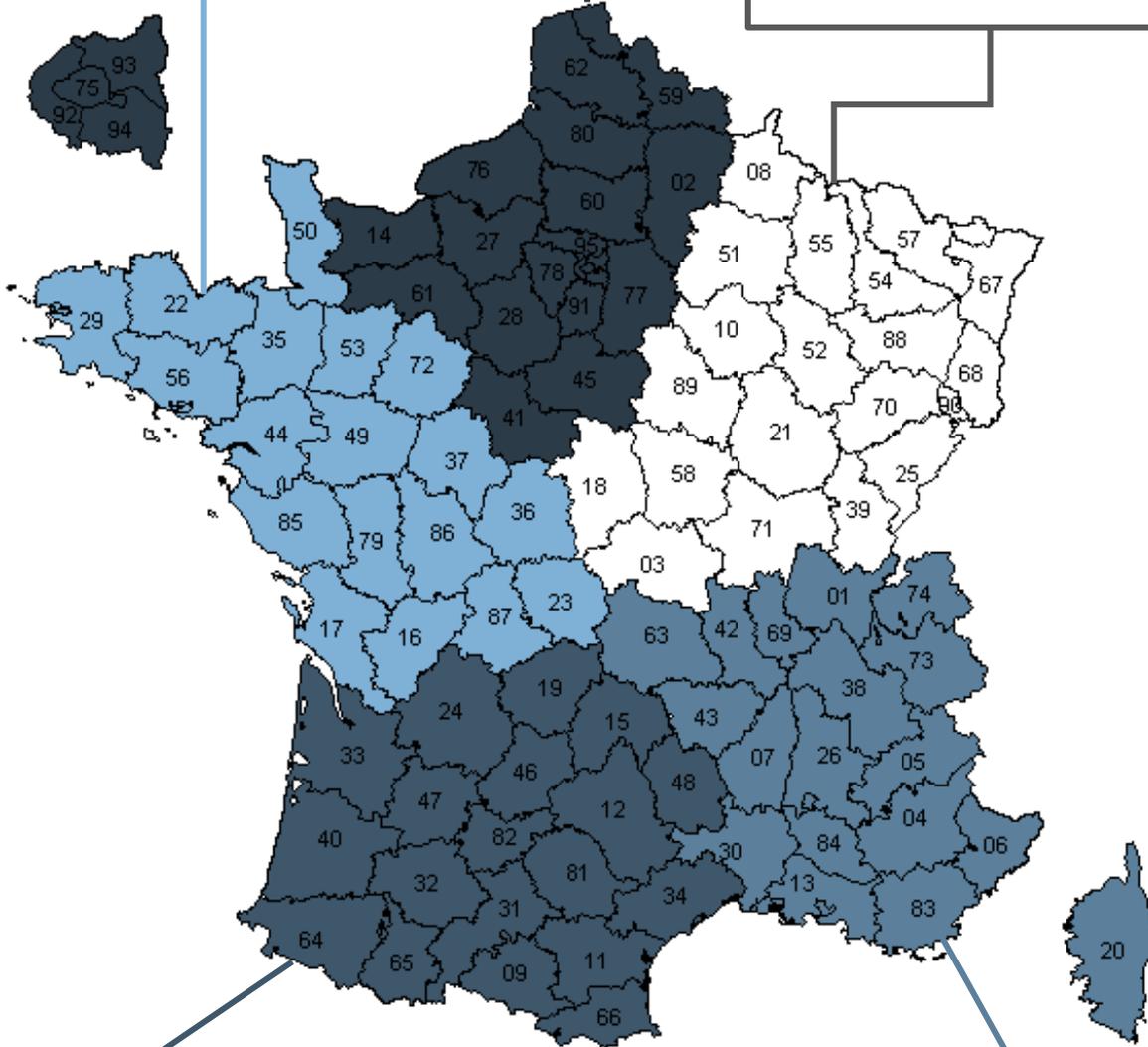

**Julien Coutarel : 07.58.08.67.57**  
Technico-commercial  
julien.coutarel@apexmedicalcorp.com

**Julien d'Agaro : 06 15 68 08 93**  
Technico-commercial  
julien.dagaro@apexmedicalcorp.com

Distributed by

FRANCE  
Apex Medical France SAS  
4 Blvd. de La Chanterie,  
49124 Saint Barthélemy d'Anjou,  
Pays De La Loire, France  
T +33 272 792 713 / F +33 285 730 767  
adv.france@apexmedicalcorp.com

SIEGE SOCIAL  
Apex Medical Corp.  
No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng, New Taipei  
City, 23679, Taiwan T +886 2 2268 3100  
F +886 2 2268 6525  
marketing@apexmedicalcorp.com

Print-2020  
All rights reserved Specifications may change without notice.  
www.apexmedicalcorp.com